




DESINFECTAR Y CUIDAR SU PROTECTOR FACIAL

actualizado 04/02/20


- 1** Localice su bolsa personal de almacenamiento; colóquela cerca de su área de limpieza.

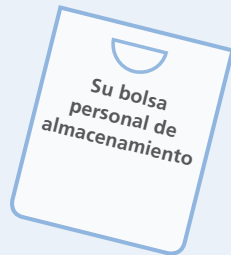


Lávese las manos y póngase guantes nuevos.



- 2** Coloque una toallita en la mesa; coloque el protector facial en la toallita, parte externa hacia abajo.

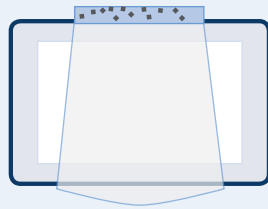

Use una toallita nueva para desinfectar la parte interna del protector. Reemplace la tira de espuma si está sucia o suelta. De vuelta al protector.

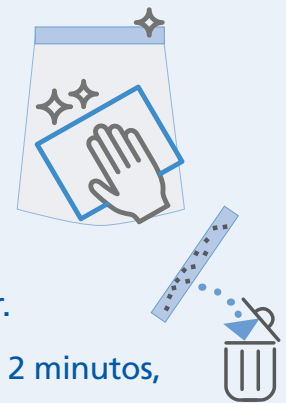

Para desinfectar, siga las pautas de contacto húmedo: tapa morada = 2 minutos, tapa gris = 3 minutos, tapa naranja = 4 minutos

- 3** Use una toallita nueva para desinfectar la parte exterior del protector facial.



Use una toallita nueva para desinfectar el contenedor de toallitas y superficies de limpieza designadas.



- 4** Quítese los guantes



Lávese las manos con agua y jabón



Coloque el protector limpio en su bolsa de almacenamiento, etiquétela, y guárdela en el área designada.

