

Para uso con configuraciones de cubierta simple y cubierta doble **con filtro de carga pesada.**

PARA COLOCAR

Debe colocarse afuera de la habitación del paciente que va a entrar en la sala de operaciones (OR, por sus siglas en inglés).

- 1** Asegúrese de colocar guantes, toallitas desinfectantes y un tacho de basura afuera de la habitación.

Asegúrese que un carrito de aislamiento o área de trabajo esté disponible justo afuera de la OR. El carrito de aislamiento o área de trabajo tendrá que estar claramente marcada como área "limpia" y área "sucia" para prevenir contaminación cruzada.

- 2** Realice higiene de manos antes de colocarse el PAPR.



- 3** PAPR

- Conecte la batería con la correa y asegure la correa alrededor de la cintura, abroche la batería directamente a los pantalones, o en el bolsillo. Coloque el casco quirúrgico o gorra, si lo desea.
- Conecte una "tira de comodidad" en la parte interior del casco a la altura de la frente con Velcro. Estos son desechables después de un uso o puede ser usado varias veces por un solo usuario. Si tiene que volver a usarlo, siga el protocolo de reuso del departamento.



- Conecte la capucha al casco. La capucha se abrocha en 3 lugares.



3 P APR (continuación)

- **Jale la capucha por encima del casco.** Asegúrese que el Velcro en la parte delantera esté limpio para asegurarse que el filtro de carga pesada pueda colocarse con seguridad.



- **Jale el filtro sobre la parte superior de la capucha y asegúrelo.**



- **Enchufe el cable de alimentación en la batería.** Empuje firmemente para asegurarlo en su lugar. Presione la lengüeta negra para sacar el cable cuando termine de usarlo.



- **Póngase una máscara quirúrgica.**

- **Revise que las luces del indicador estén funcionando.** Verifique que el sistema esté funcionando correctamente y que haya suficiente batería. No la utilice si las luces de bajo flujo (amarillas) o poca batería (rojas) están prendidas.



- **Póngase la capucha y gire la perilla hasta el ajuste deseado.** Amarre las tiras de la cubierta por el cuello y la cintura.

- **Inicie el P APR y ajuste la visibilidad y la audición.** Encuentre el botón de control por la parte trasera del casco.

4 Bata y guantes

- **Póngase una bata de cirugía y un juego de guantes estériles dobles.** La bata debe colocarse por encima de la cubierta y el aire fluirá hacia dentro de la bata.



PARA QUITAR

Debe quitarse la bata y los guantes dentro de la OR alado de la puerta, antes de salir del área de atención. Los PAPR deben quitarse y desinfectar afuera de la OR. Su PPE puede estar contaminado. Al quitárselo, evite contaminarse, contaminar a otros y el ambiente alrededor. Si la bata o cubierta de la cabeza esta extremadamente contaminada, limpie con toallitas desinfectantes antes de quitárselo.

1 Bata y guantes

- Desamarre las tiras o rómpalas jalando con cuidado por la parte delantera de la bata.
- Con cuidado, desprende la bata y el juego de guantes de afuera de adentro hacia afuera, enróllelos y deséchelos. No empuje hacia dentro de la basura para evitar la contaminación.
- Salga del área de atención. **SALIDA**




2 PAPR

- Retire la capucha del casco jalando la capucha por encima y enfrente del casco con mucho cuidado. Si es posible, pida que otra persona le ayude quitarse la capucha para evitar la contaminación.
- Retire la capucha del casco al separarla de los 3 broches en los costados y parte delantera del casco. Deséchela adecuadamente.



- Retire el cable de la batería (no del casco) empujando la lengüeta de atrás.
- Retire el segundo juego de guantes, **lávese las manos** y póngase guantes limpios.

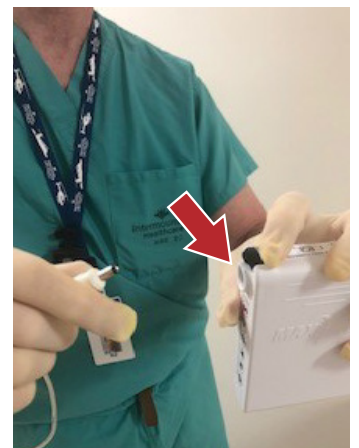

PARA LIMPIAR

Proceso de limpieza para las PAPR MaxAir usadas con capuchas desechables para procedimientos estériles. Cuando se utiliza en un campo estéril con configuración de capucha desechable, la capucha PAPR no es reutilizable. Debe desecharla después de cada uso.

- 1 Desamarre la correa del PAPR (si está utilizando uno) y coloque la batería en el área sucia designada. Si no está utilizando la correa, retire la batería de su bolsillo y colóquela en el área sucia designada.
- 2 Retire el casco del PAPR y colóquelo en el área sucia designada.
- 3 Retire los guantes, **lávese las manos**, y póngase guantes limpios.
- 4 Desinfecte los componentes usando las toallitas de tapa morada o tapa naranja. Asegúrese que se cumplan los tiempos de contacto según el uso de las toallitas: tapa morada (2 minutos), tapa naranja (4 minutos).
- 5 Use 1 toallita para desinfectar la correa, si utilizo una, y la batería. Colóquela en el área de almacenamiento "limpia" designada.
- 6 Usando una toallita nueva, **desinfecte la parte interior del casco**. Retire la tira de Velcro del interior del casco y siga el protocolo de su departamento para usarlo después. Estas tiras son para uso personal y no deben usarse por varios usuarios.
- 7 Usando una toallita nueva, **desinfecte la parte exterior del casco y del cable**. Coloque el casco desinfectado en el área de almacenaje "limpia" designada.
- 8 Desinfecte el área de trabajo "sucia" designada y limpie el dispensador.
- 9 Quítese los guantes y bótelos. **Lávese las manos**.

